

先生各位

## 新規検査項目のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび新たに下記項目の受託を開始することになりましたのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《受託開始日》 平成 27 年 8 月 24 日（月）受付分より

《検査要項》

|           |                               |        |
|-----------|-------------------------------|--------|
| 検査項目名称    | HPV-DNA ハイリスク型 HC             |        |
| 検査コード     | 7191                          | 9339   |
| JLAC10    | 5F101 - 1405 - 085 - 900 - 11 |        |
| 診療行為コード   | 160185610                     |        |
| 検体量（検体材料） | 子宮頸部擦過細胞                      |        |
| 容器・保存     | HP（専用）・冷蔵                     | P5H・常温 |
| 実施料（判断料）  | 360 点（微生物）                    |        |
| 所要日数      | 4 ～ 8 日                       |        |
| 検査方法      | ハイブリッドキャプチャー法                 |        |
| 基準値       | 陰性                            |        |

保険収載名称：HPV 核酸検出

保 険 注 釈：ア 予め行われた細胞診の結果、ベセスタ分類上 ASC-US（意義不明異型扁平上皮）と判定された患者に対して行った場合に限り算定できる。なお、細胞診と同時に実施した場合は算定できない。

イ HPV 核酸検出と HPV 核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）を併せて実施した場合は、主たるもの 1 つに限り算定する。

《解 説》

HPV（ヒトパピローマウイルス）は子宮頸癌の原因ウイルスとして、子宮頸癌から頻度高く検出される 13 種類の型（16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68）が判明しています。本検査は、ハイブリッドキャプチャー法を用いてその 13 種類のハイリスク型 HPV を検出することができます。（型判別は出来ません）

《 相 関 》

|                   |    | リアルタイム PCR 法 |    |     |
|-------------------|----|--------------|----|-----|
|                   |    | 陽性*          | 陰性 | 計   |
| ハイブリッド<br>キャプチャー法 | 陽性 | 65           | 3  | 68  |
|                   | 陰性 | 5            | 27 | 32  |
|                   | 計  | 70           | 30 | 100 |

一致率 92.0% (自社検討データ)

\*16 型、18 型、他ハイリスク型それぞれの陽性結果を統合しています。

《 容 器 》

|                                                                                                  |                                                                                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <div>HP</div>  | 内容                                                                                      | 保存液 1.0mL   |
|                                                                                                  | 容器の貯蔵方法<br>有効期間                                                                         | 常温<br>表示どおり |
|                                                                                                  | 適用検査項目と採取上の注意点<br><br>HPV-DNA ハイリスク型 HC<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>※本検査専用容器 |             |

|                                                                                                   |                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <div>P5H</div>  | 内容                                      | 保存液（アルコール類）10mL         |
|                                                                                                   | 容器の貯蔵方法<br>有効期間                         | 遮光下（15～30℃）<br>1 年 6 ヶ月 |
|                                                                                                   | 適用検査項目と採取上の注意点<br><br>HPV-DNA ハイリスク型 HC |                         |

●HP 容器を使用した検体材料の採取方法に関しましては、別途ご案内させていただきます。