

先生各位

検体採取方法に関するご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。


さて、先般ご案内いたしました「HPV-DNA ハイリスク型 HC」の採取容器（HP）につきまして、検体採取方法に関する追記事項がございますのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《検体採取方法について》

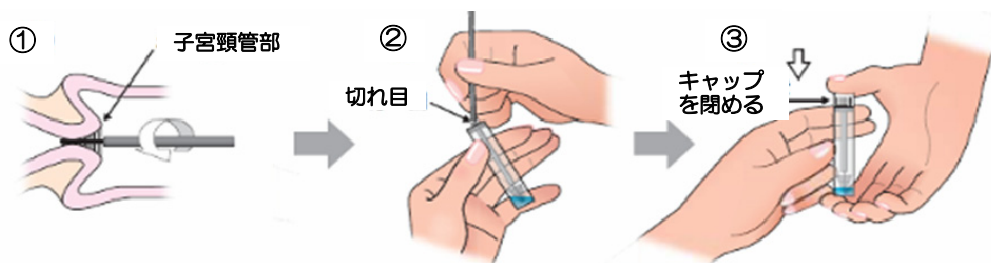

- ① 専用の子宮頸部検体採取用ブラシ(HPVサンプラー)のブラシ部を子宮頸管に1～1.5 cm位挿し、3回、反時計回りに回転させ擦過物を採取します。
- ② ブラシを付属の検体輸送液の入ったチューブに入れ、折れ目部分でブラシの軸を折ります。
- ③ ブラシが入った状態でキャップを閉めてください（冷蔵保存）。