

先生各位

## フルベストラント（薬剤）がE<sub>2</sub>（エストラジオール） 測定値へ及ぼす影響についてのご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社使用のE<sub>2</sub>（エストラジオール）検査試薬におきまして、以下の報告がメーカーよりございましたのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### 《対象項目》

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称
P.37	6192	E <sub>2</sub> （エストラジオール）

#### 《報告内容》

閉経後乳癌治療剤として用いられる「フルベストラント（商品名：フェソロデックス<sup>®</sup>筋注250mg）」の影響により、E<sub>2</sub>（エストラジオール）の測定値が、高値傾向（交差反応性：約0.08%）になる可能性があります。

注）フルベストラントの影響を受けないE<sub>2</sub>測定法の受託は行っておりませんので、予めご了承願います。