

鼻汁好酸球検査の検体採取方法について

採取方法 鼻汁量が多い場合 : セロファン紙、ハترون紙、葉包紙など水分を吸収しにくい紙、あるいはラップのようなものに鼻をかませ、鼻汁の数ヶ所から綿棒あるいはピンセットの尖でスライドガラスに採ってください。
鼻汁量が少ない場合: 鼻腔より綿棒で直接採取し、スライドガラスへ採ってください。(粘膜を擦過しないように注意してください。)

標本作成方法 細胞が潰れないように、軽く薄く小円を描くようにスライドガラスの中央に塗抹してください。塗抹後、速やかに扇風機やドライヤー(冷風)などで乾燥させてください。
(自然乾燥の場合は、十分乾燥させ標本ケースに入れてください。)

