



STD マルチ (QMS・QMU)

採取方法


● 分泌物 (QMS)

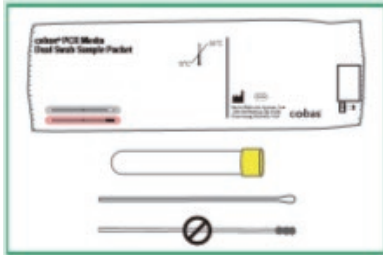


スワブ検体採取セットに付属されているスワブ (大) のみを使用します。
スワブ (小) は使用しないでください。

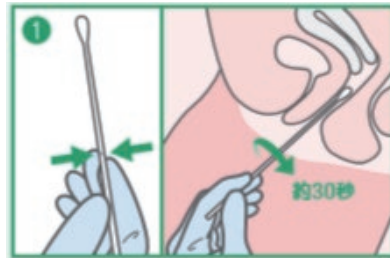

片手でスワブ (大) の黒い線の下側の柄を持ち、膣口から 5cm ほど挿入します。
スワブを膣壁にこすりつけるようにして時計回りに約 30 秒ほどゆっくりと回します。
スワブを慎重に引き抜きます。
スワブ搬送用チューブに保管するまでは先端部がどこにも触れないようにしてください。

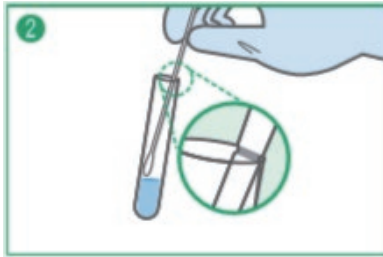


スワブ搬送用チューブのキャップを開けます。採取したスワブの先端が、チューブ内の溶液に漬からないように注意しながら入れ、柄に付けられた黒い線をチューブの緑の線に合わせます。

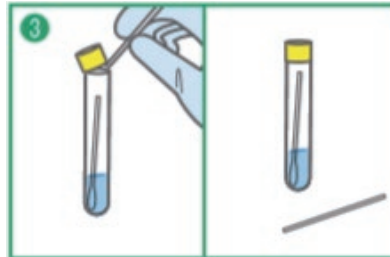


チューブの緑の線を利用して、スワブの柄に付けられた黒い線で折ります。
折られた柄は廃棄してください。また、柄を折る際は絶対にはさみを使用しないでください。
キャップをしっかりと閉めます。


● 初尿 (QMU) :最後の排尿から 1 時間以上経過していることを確認してください。

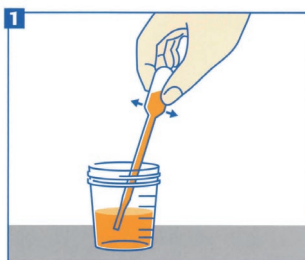


尿採取カップに初尿を採取します。
スポイド等を使用して尿・うがい液搬送用チューブに移します。

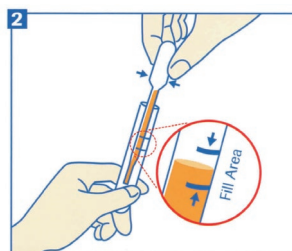

尿・うがい液搬送用チューブに記載されている 2 つのラインの間に収まるように初尿を加えてください。(約 5 mL)

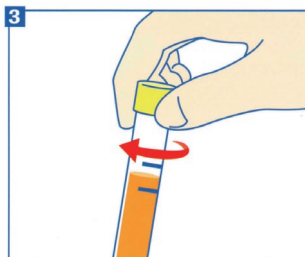

尿・うがい液搬送用チューブのキャップをしっかりと閉めてください。

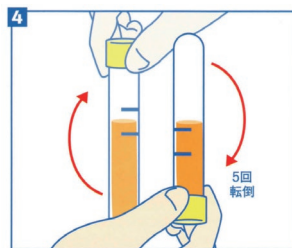

尿・うがい液搬送用チューブを 5 回転倒混合させてください。