



## 採取方法


### ● 膣分泌物 (QS)

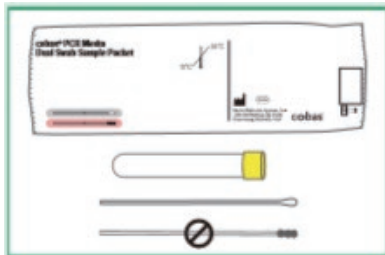


スワブ検体採取セットに付属されているスワブ（大）のみを使用します。  
スワブ（小）は使用しないでください。

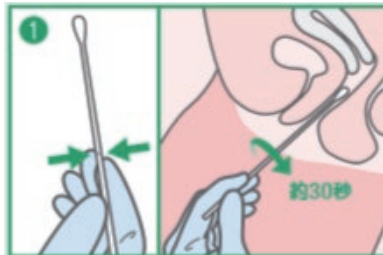

片手でスワブ（大）の黒い線の下側の柄を持ち、膣口から5cmほど挿入します。  
スワブを膣壁にこすりつけるようにして時計回りに約30秒ほどゆっくりと回します。  
スワブを慎重に引き抜きます。  
スワブ搬送用チューブに保管するまでは先端部がどこにも触れないようにしてください。

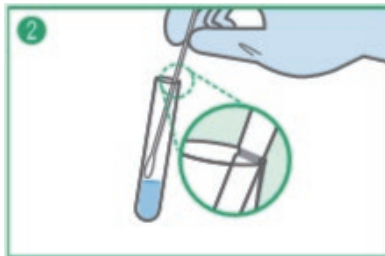

スワブ搬送用チューブのキャップを開けます。採取したスワブの先端が、チューブ内の溶液に漬からないように注意しながら入れ、柄に付けられた黒い線をチューブの縁に合わせます。

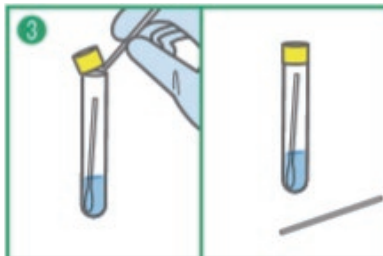

チューブの縁を利用して、スワブの柄に付けられた線で折ります。  
折られた柄は廃棄してください。また、柄を折る際は絶対にはさみを使用しないでください。  
キャップをしっかりと閉めます。