


HPV-DNA ハイリスク型 HC [ハイブリッドキャプチャー法 (HP)]

採取方法

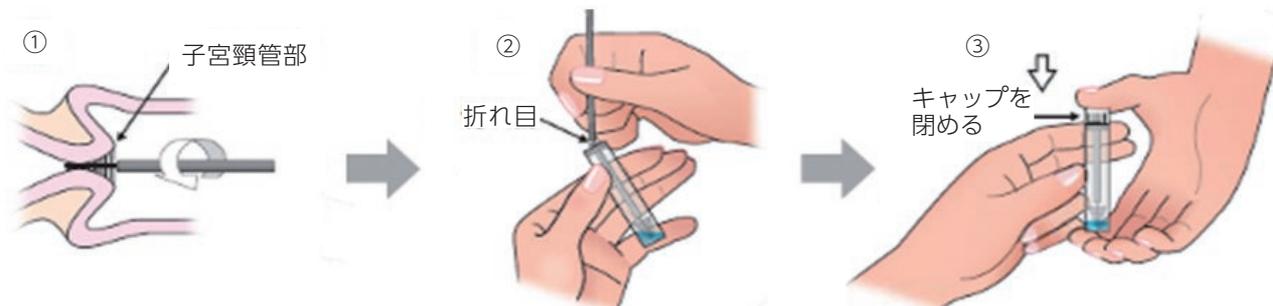

- ①専用の子宮頸部検体採取用ブラシ（HPVサンプラー）のブラシ部を子宮頸管に1～1.5 cm位挿入し、**3回、反時計回りに**回転させ擦過物を採取します。
- ②ブラシを付属の検体輸送液の入ったチューブに入れ、折れ目部分でブラシの軸を折ります。
- ③**ブラシが入った状態**でキャップを閉めてください（冷蔵保存）。