

容器名:A5



内容

血清分離剤  
凝固促進フィルム

採取量

3mL

容器の貯蔵方法

常温

有効期間

1年

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### ECP

- 血液2.5～3.0mLを採取し、5～6回ほど静かに転倒混和したのち60～120分間24～28℃に静置します。静置後10分間遠心分離し、血清をA2容器に移し替えて冷蔵保存してください。なお、静置時の温度条件により値が大きく変動する場合がありますので、温度変化にご注意ください。