

容器名:C2



内容	3. 2%クエン酸Na 0. 5mL
採取量	4. 5mL
容器の貯蔵方法	常温
有効期間	1年(開封後1ヵ月)

適用検査項目と採取上の注意点

凝固抑制第 VIII 因子
凝固抑制第 IX 因子
ビタミンK分画

- 血液 4. 5mLを採取し、5～6回ほど静かに転倒混和したのち、速やかに遠心分離し、血漿を [A2容器](#)に移し替えて凍結保存してください。
- ビタミンK分画をご提出の際は遮光してください。