

容器名: E1

10mL

5mL



内容

EDTA-2Na
14mg・4mg

容量

10mL・5mL
(真空採血量:
7mL・2mL)

容器の貯蔵方法

常温

有効期間

製造後1年6ヵ月

適用検査項目と採取上の注意点

ACTH、アミノ酸分析、アルドステロン、
レニン活性(PRA)、レニン定量(ARC)、
BNP、カテコールアミン、ProGRP
PTH-intact、ホール PTH

- 血液(必要量の約3倍)を採取し、5~6回ほど静かに転倒混和したのち、速やかに遠心分離し、血漿を [A2容器](#) に移し替えて凍結保存してください。
- PTH-intact、ホール PTH については、血液採取後 5~6 回ほど静かに転倒混和したのち、そのまま冷蔵保存してください。