

容器名:H1



内容	ヘパリンNa 130IU
容量	10mL
容器の貯蔵方法	常温
有効期間	2年

適用検査項目と採取上の注意点

リンパ球混合培養(MLC)

- 血液(必要量の約3倍)を採取し、5~6回ほど静かに転倒混和したのち、速やかに遠心分離し、血漿を [A2容器](#) に移し替えて凍結保存してください。
- 全血の項目については、項目の保存条件にあわせてそのまま冷蔵又は常温保存し、当日中に出検してください。