


容器名:H2

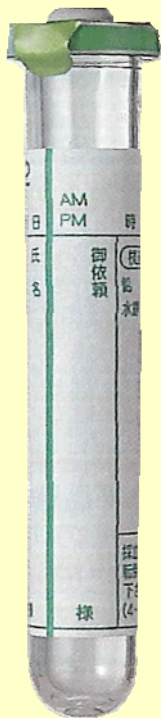

内容

ヘパリンNa 65IU

容量

5mL

容器の貯蔵方法

常温

有効期間

2年

### 適用検査項目と採取上の注意点

鉛(Pb)

水銀(Hg)

マンガン(Mn)

クロム(Cr)

- 必要量の血液を採取し、5～6回ほど静かに転倒混和したのち、速やかに遠心分離後上清をA2容器に移し替えて凍結保存してください。
- 全血の項目については、項目の保存条件にあわせてそのまま冷蔵、又は常温保存し、当日中に出検してください。