

容器名 : HM3



内容

ヘパリンリチウム 21IU / mL  
PHA  
分離剤

採取量

1mL

容器の貯蔵方法

4~ 25° C

有効期間

容器ラベルに記載

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### クオンティフェロン- 3G

採血はHN3、HT3、HM3の順に行ってください。  
採血管は17~ 27° Cになったものを使用してください。

採血量は採血管ラベルの採血ライン内(0.8~ 1.2mL)を厳守してください。

採血後、採血管を上下に5秒間または10回振って混合してください。

培養前の血液検体は17~ 27° Cで保存してください。  
検体の採取方法は、当該検査項目の「検体取扱・備考」別表をご参照ください。