

容器名 : HT3



内容

結核菌特異蛋白 ESAT - 6  
結核菌特異蛋白 CFP - 10  
結核菌特異蛋白 TB7.7(p4)  
ヘパリンリチウム 21IU/mL  
分離剤

採取量

1mL

容器の貯蔵方法

4~25°C

有効期間

容器ラベルに記載

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### クオンティフェロン- 3G

採血はHN3、HT3、HM3の順に行ってください。

採血管は17~27°Cになったものを使用してください。

採血量は採血管ラベルの採血ライン内(0.8~1.2mL)を厳守してください。

採血後、採血管を上下に5秒間または10回振って混合してください。

培養前の血液検体は17~27°Cで保存してください。

検体の採取方法は、当該検査項目の「検体取扱・備考」別表をご参照ください。