

容器名:K3



内容

保存液

容器の貯蔵方法

常温

有効期間

2年

適用検査項目と採取上の注意点

便ヘモグロビン&トランスフェリン

- キャップを取る際は容器中の液がこぼれないように注意してください。
- 採便スティックで便の表面をまんべんなく擦り取ります。便の量は採便スティック先端の突出部に便が付く程度が適量です。便が余分についたときは、ティッシュペーパーなどで余分な便を拭き取ります。
- 採便スティックを容器へ戻し、しっかりとキャップをします。容器を縦に数回強くふって、便の懸濁液をつくります。
- 採取後は冷蔵保存してください。