


容器名:K5

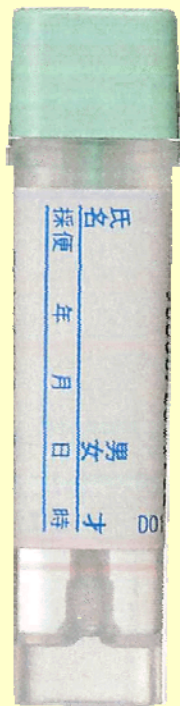

内容	保存液
容器の貯蔵方法	常温
有効期間	1年6ヵ月

適用検査項目と採取上の注意点

便ヘモグロビン〔ラテックス法〕

- キャップを取る際は容器中の液がこぼれないように注意してください(アルミシールはやぶらないでください)
- 採便スティックで便の表面をまんべんなく擦り取ります。便の量は採便スティック先端のみぞに埋まるぐらいが適量です。
- 採便スティックを容器へ戻し、パチンと音がするまでしっかりとキャップをします。
- 採取後は冷蔵保存してください。