

容器名:M1



内容

ヘパリンNa 95IU  
RPMI1640培養液

採取量

0.5mL

容器の貯蔵方法

冷凍・冷蔵

有効期間

6カ月・1カ月

### 適用検査項目と採取上の注意点

血液疾患染色体(骨髄液)

フィラデルフィア染色体(骨髄液)

- 冷凍保存されていた容器は使用前に解凍してください。
- キャップを取らずに骨髄液 0.5mLを採取し、5~6回ほど静かに転倒混和したのち、そのまま冷蔵保存して当日中に出検してください。