

容器名：○



内容	0.8N過塩素酸 0.5mL
採取量	0.5mL
容器の貯蔵方法	冷蔵
有効期間	1年

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### ビタミンC

- 血液をA1容器に採取し、速やかに遠心分離後、血清0.5mLを正確に○容器に移し替え転倒混和。再度 3000rpm5分間遠心分離してその上清をA2容器に移し替えて遮光し、凍結保存してご提出ください。
- 検体の採取方法については、当該項目の「検体取扱・備考」欄別表をご参照ください。