


容器名:P2

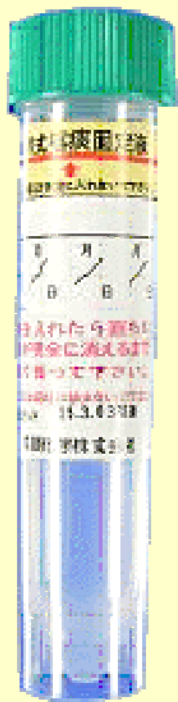

内容

保存液
(粘液融解剤, アルコール)

容器の貯蔵方法

遮光下(15~30℃)

有効期間

1年

適用検査項目と採取上の注意点

細胞診検査(蓄痰)

- 起床後最初に排痰されたものが最も検査に適した喀痰です。
- 排痰前に口中をきれいにすすいください。
- 深く息を吸いこみ大きな咳をすると痰が出易いです。
- 容器に痰を入れ、フタをしっかり閉め、15~20回強く振ってください。
- 痰は赤い線をこえないように注意してください。
- 以上のことを3日間くり返してください(別表参照)。