


容器名:P3

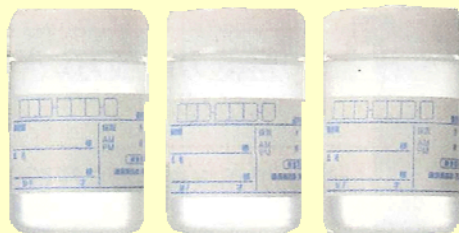

内容	保存液 (50%エタノール 1%チモール 0.4~0.5%塩化Na)	採取上の注意点 <ul style="list-style-type: none">○ 起床後最初に排痰されたものが最も検査に適した喀痰です。○ 排痰前に口中をきれいにすすいでください。○ 深く息を吸いこみ大きな咳をすると痰が出易いです。○ 3日間連続して採取してください。○ 1日1個の容器を使用し、容器ラベルに採取日を記入してください。
容器の貯蔵方法	遮光下(1~15℃)	
有効期間	1年	
適用検査項目	細胞診検査(連痰)	