

容器名:P4



内容	保存液(酢酸, メタノール)
採取量	10mL
容器の貯蔵方法	(遮光下)冷蔵
有効期間	1年

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### 細胞診検査(尿)

- 採尿後、しばらく静置し1/3下方より尿10mL(目盛のところまで)を容器に入れ、冷蔵保存してください。
- 尿を容器に入れる際には内ふた(アルミシール)を全て取り外してスクリューキャップはしっかりと閉めてください。
- 早朝尿(起床後最初の尿)は採取しないでください。
- 検体の採取方法については、当該項目の「検体取扱・備考」欄別表をご参照ください。