

容器名:P5H

※関西・九州エリア以外



内容	保存液(アルコール類)
容量	10mL
容器の貯蔵方法	15～30℃(遮光)
有効期間	製造後1年6ヵ月

適用検査項目と採取上の注意点

婦人科細胞診液状検体法
HPV-DNA16 型、18 型、他ハイリスク型〔PCR 法〕
HPV ジェノタイプ判定
HPV-DNA ハイリスク型 HC

- 採取ブラシの先端を容器内に入れてください。

容器名:P5H

※関西・九州エリア限定



内容	保存液(アルコール類)
容量	20mL
容器の貯蔵方法	冷暗所
有効期間	表示どおり

適用検査項目と採取上の注意点

婦人科細胞診液状検体法
HPV-DNA16 型、18 型、他ハイリスク型〔PCR 法〕
HPV ジェノタイプ判定
HPV-DNA ハイリスク型 HC

- ブラシの先端は容器内に入れなくてください。
- ブラシは容器の底で毛先が広がるように素早く10回押し付けてください。
- 頸管ブラシは容器の内壁に押し当てながら素早く10回転させてください。