

容器名:Q14



鼻腔用 咽頭用

内容

-----

容器の貯蔵方法

常温

有効期間

2年

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### インフルエンザA/Bウイルス抗原 A群 $\beta$ 溶連菌迅速試験

- **咽頭ぬぐい液**  
滅菌綿棒を口腔から咽頭にゆっくり挿入し、咽頭後壁、口蓋、扁桃を綿棒で軽く押しつけるように数回こすり採取してください。
- **鼻腔ぬぐい液**  
滅菌綿棒を外鼻孔にゆっくり挿入し、鼻甲介を綿棒で数回こすり採取してください。
- **鼻腔吸引液**  
吸引液を吸引トラップへ採取して、これに綿棒を十分浸して検体としてください。