

容器名:Q18

内容


PBS 2mL

容器の貯蔵方法

常温

有効期間

1年

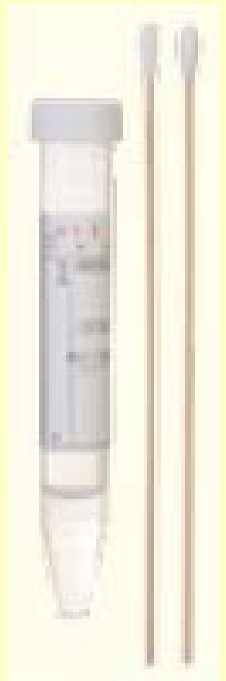

適用検査項目と採取上の注意点

HPV-DNA タイピング

- 滅菌ガーゼ又は滅菌綿棒で子宮頸部(頸部管を中心に)の過剰な粘液を除去したのち、別の滅菌棒を子宮頸部に挿入して5~10回回転させ上皮細胞を採取してください。次に綿棒を慎重に引き抜き、専用容器に綿棒を差し込み、綿棒の柄を栓キャップがしっかり閉じられる長さ折り(またはハサミで)切り取ってください。綿棒を差し込んだまま、栓キャップをしっかり閉めてください。

(注) コルポスコピーによる診断を行う場合は、酢酸処理する前に検体を採取してください。