

容器名:QA



内容	-----
容器の貯蔵方法	常温
有効期間	製造後2年

適用検査項目と採取上の注意点

マイコプラズマ・ニューモニウ核酸同定

○ 咽頭ぬぐい液

滅菌綿棒を口腔から咽頭にゆっくり挿入し、咽頭後壁、口蓋、扁桃を綿棒で軽く押しつけるように数回こすり採取してください。

○ 鼻腔ぬぐい液

滅菌綿棒を外鼻孔にゆっくり挿入し、鼻甲介を綿棒で数回こすり採取してください。

○ 鼻腔吸引液

吸引液を吸引トラップへ採取して、これに綿棒を十分浸して検体としてください。