

容器名：QA



鼻腔用 咽頭用

内容

容器の貯蔵方法

常温

有効期間

2年

適用検査項目と採取上の注意点

マイコプラズマ・ニューモニエ核酸同定

- 内容はQ14容器と同じです。
- **咽頭ぬぐい液**
滅菌綿棒を口腔から咽頭にゆっくり挿入し、咽頭後壁、口蓋、扁桃を綿棒で軽く押しつけるように数回こすり採取してください。
- **鼻腔ぬぐい液**
滅菌綿棒を外鼻孔にゆっくり挿入し、鼻甲介を綿棒で数回こすり採取してください。
- **鼻腔吸引液**
吸引液を吸引トラップへ採取して、これに綿棒を十分浸して検体としてください。