


容器名:R

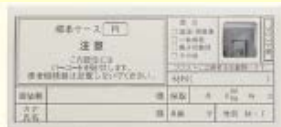

※提出時は、セロファンテープもしくは輪ゴムで、解放部3面を確実に留めてください。

## 適用検査項目と採取上の注意点

### 一般細菌鏡検(白)

### 細胞診(ピンク)

塗抹後直ちに固定液等で固定してください。

### 血液像(白)

1~2枚ご提出ください。

### 特殊染色(白)

2~3枚ご提出ください。

### 骨髄像(白)

5~6枚ご提出ください。

### 鼻汁好酸球(白)

スライドに軽く薄く小円を描くように塗抹し、冷風で乾燥させてください。

### 遺伝子関連検査(白)

10 $\mu$ m厚に薄切した切片を5~10枚ご提出ください。

- 標本ケースの項目欄に○印を付けるか、または項目名を記入してください。
- 塗抹標本作成後は常温保存してください。