## 容器名:S



内容	ヘパリン Na 15IU(ノボヘパリン)
採取量	3mL
容器の貯蔵方法	常温(遮光)
有効期間	製造後2年

## 適用検査項目と採取上の注意点

エンドトキシン定量 (1→3)-β-D-グルカン

- キャップを取らずに血液3mLを無菌的に採取し、 5~6回ほど静かに転倒混和したのち、そのまま 冷蔵保存してください。
- 他項目との重複依頼は避けてください。
- 〇 透析液の測定はできません。