

容器名:T1



内容

改良アミーズ培地

容器の貯蔵方法

遮光下 常温

有効期間

1年

適用検査項目と採取上の注意点

一般細菌検査(嫌気性培養含む)

塗抹鏡検

培養・同定・感受性

真菌培養

抗酸菌検査

塗抹鏡検・培養

- 滅菌綿棒で病変部をできるだけ多く採取し、培地内に挿入してください。
- 採取後は冷蔵保存してください。(目的菌が淋菌、髄膜炎菌の場合は常温保存)