

容器名:U10



内容	1. 5M Tris-HCl 0. 5mL	採取上の注意点 ○ 早朝一番尿を採取し、スポイトで5mLを容器に移し替え、よく混和したのち、冷蔵保存してください。 ○ 凍結保存、および他項目との重複依頼は、避けてください。 (検体採取方法の詳細は、容器添付の説明書をご参照ください。)
採取量	5mL	
容器の貯蔵方法	常温	
有効期間	2年	
適用検査項目	尿中 IV 型コラーゲン	