

容器名:U3

内容

容量

50mL

容器の貯蔵方法

常温



適用検査項目と採取上の注意点

コプロポルフィリン

17-KGS

17-KGS 2分画

17-KS 7分画

- 24時間蓄尿の場合、蓋付蓄尿瓶にトルエンを1～2mL入れておき、24時間冷暗所で蓄尿してください。
- 酸性蓄尿の場合、蓋付蓄尿瓶(容器ラベルに「酸性蓄尿」と明記)に6N塩酸を成人は20mL、小児は5～10mLを入れ、24時間冷暗所で蓄尿してください。(pH3.0以下で保存)
- 必要量を提出容器**U3容器**に移し、提出時まで冷蔵保存してください。