


容器名:Y

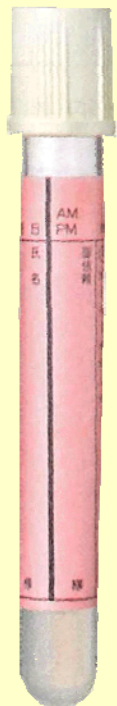

内容	凝固促進剤、分離剤
採取量	5mL
容器の貯蔵方法	1～30℃
有効期間	1年

適用検査項目と採取上の注意点

HCV-RNA定量 アキュジーン

HCV-RNA定量 TaqManPCR

HCV-RNAジェノタイプ

HBV-DNA定量 TaqManPCR

ヒトパルボウイルスB19型DNA

- 血液5mLを採取し、5～6回ほど静かに転倒混和したのち、約30分間常温に静置します。凝固完了後遠心分離し、そのまま凍結保存してください。
- 他項目との重複依頼は避けてください。