

容器名:D



内容	CPD溶液 0.85mL
採取量	5mL
容器の貯蔵方法	常温
有効期間	表示どおり(開封後3週間)

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### 細胞性免疫検査 NK細胞活性

- 血液5mLを採取し、5～6回ほど静かに転倒混和したのち、そのまま常温保存してください。
- リンパ球の少ない患者は多めに採血してください。
- キャップを取らないで無菌的に採血してください。
- 採血後当日中に出検してください。