

容器名: E1A

10mL

5mL



内容

EDTA-2Na
14mg・4mg

容量

10mL・5mL
(真空採血量:
7mL・2mL)

容器の貯蔵方法

常温

有効期間

製造後1年6カ月

適用検査項目

UGT1A1遺伝子多型解析 など

- 血液(必要量の約3倍)を採取し、5～6回ほど静かに転倒混和したのち、速やかに遠心分離し、血漿を [A2容器](#) に移し替えて凍結保存してください。
- PTH-intact、ホール PTH については、血液採取後 5～6 回ほど静かに転倒混和したのち、そのまま冷蔵保存してください。