

容器名:M1



内容	ヘパリンNa 95IU RPMI1640培養液
採取量	0.5mL
容器の貯蔵方法	冷凍・冷蔵
有効期間	製造後6カ月・1カ月

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### 細胞性免疫検査(骨髄液)

- 冷凍保存されていた容器は、使用前に解凍してください。
- キャップを取らずに骨髄液 0.5mLを採取し、5～6回ほど静かに転倒混和し、そのまま冷蔵保存して当日中にご提出ください。