




容器名：P5 ※関西・九州エリア以外 	内容	保存液(アルコール類)
	容量	10mL
	容器の貯蔵方法	遮光下(15~30℃)
	有効期間	1年6カ月
	適用検査項目と採取上の注意点 婦人科細胞診液状検体法 HPV-DNA16型、18型、他ハイリスク型〔PCR法〕 HPVジェノタイプ判定 HPV-DNAハイリスク型HC ○ 採取ブラシの先端を容器内に入れてください。	

容器名：P5 ※関西・九州エリア限定 	内容	保存液(アルコール類)
	容量	20mL
	容器の貯蔵方法	冷暗所
	有効期間	表示どおり
	適用検査項目と採取上の注意点 婦人科細胞診液状検体法 HPV-DNA16型、18型、他ハイリスク型〔PCR法〕 HPVジェノタイプ判定 HPV-DNAハイリスク型HC ○ ブラシの先端は容器内に入れないでください。 ○ ブラシは容器の底で毛先が広がるように素早く10回押し付けてください。 ○ 頸管ブラシは容器の内壁に押し当てながら素早く10回転させてください。	

容器名：P5 ※関西・九州エリア限定 	内容	保存液(アルコール類)
	容量	20mL
	容器の貯蔵方法	冷暗所
	有効期間	表示どおり
	適用検査項目と採取上の注意点 婦人科細胞診液状検体法 (HPV検査と同時依頼の場合) ○ ブラシの先端は容器内に入れないでください。 ○ ブラシは容器の底で毛先が広がるように素早く10回押し付けてください。 ○ 頸管ブラシは容器の内壁に押し当てながら素早く10回転させてください。	