

容器名：R

※提出時は、セロファンテープもしくは輪ゴムで、開放部3面を確実に留めてください。

適用検査項目と採取上の注意点

一般細菌鏡検(白)

細胞診(ピンク)

塗抹後直ちに固定液等で固定してください。

血液像(白)

1～2枚ご提出ください。

特殊染色(白)

2～3枚ご提出ください。

骨髓像(白)

5～6枚ご提出ください。

鼻汁好酸球(白)

スライドに軽く薄く小円を描くように塗抹し、冷風で乾燥させてください。

遺伝子関連検査(白)

10 μ m厚に薄切した切片を5～10枚ご提出ください。

- 標本ケースの項目欄に○印を付けるか、または項目名を記入してください。
- 塗抹標本作成後は常温保存してください。