

## 容器名:T1



T-1(1) T-1(2)

内容	改良アミーズ培地
容器の貯蔵方法	常温(遮光)
有効期間	製造後1年

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### 一般細菌検査(嫌気性培養含む)

塗抹鏡検

培養・同定・感受性

真菌培養

#### 抗酸菌検査

塗抹鏡検・培養

- 滅菌綿棒で病変部をできるだけ多く採取し、培地内に挿入してください。
- 採取後は冷蔵保存してください。(目的菌が淋菌、髄膜炎菌の場合は常温保存)