

容器名:T6



内容	-----
容器の貯蔵方法	常温
有効期間	製造後2年

適用検査項目と採取上の注意点

一般細菌検査

塗抹鏡検
培養・同定・感受性
真菌培養

抗酸菌検査

塗抹鏡検・培養
結核菌群核酸検出
MAC核酸検出
(喀痰の場合)

- 起床後最初に排出された喀痰が、最も検査に適しています。
- 排痰前に口中をきれいにすすいでください。
- 深く息を吸い込み大きな咳をすることで、痰が出やすくなります。
- 採取後は冷蔵保存してください。