

5容器名:U3

内容	-----
容量	100mL
容器の貯蔵方法	常温



### 適用検査項目と採取上の注意点

コプロポルフィリン  
ウロポルフィリン(尿)  
ポルフォビリノーゲン

- 24時間蓄尿の場合、蓋付蓄尿瓶にトルエンを1～2mL入れておき、24時間冷暗所で蓄尿してください。  
酸性蓄尿の場合、蓋付蓄尿瓶(容器ラベルに「酸性蓄尿」と明記)に6N塩酸を成人は20mL、小児は5～10mLを入れ、24時間冷暗所で蓄尿してください。(pH3.0以下で保存)  
必要量を提出容器U3容器に移し、提出時まで冷蔵保存してください。